

Режимы дезинфекции стоматологических оттисков

Дезинфицирующее средство	Режимы дезинфекции		Применение
	Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин	
Глутарал (Россия)	Без разведения	10	Оттиски альгинатные (кальцинат, стомальгин, упин) и силиконовые (сиэласт 03, 05, 69, дентафлекс)
Глутарал-Н (Россия)	То же	10	То же
Сайдекс («Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд», США)	—	10	—
Перекись водорода (Россия)	4,0	15	Оттиски силиконовые
Дезоксон-1 (Россия)	0,1	10	То же
Дезоксон-4 (Россия)	0,1	10	—
Гипохлорит натрия, получаемый электрохимическим методом	0,5	20	—
МД-520 («Дюрр-ДентальОрохим», Германия)	Без разведения	10	Оттиски альгинатные, силиконовые, из полиэфирной смолы, гидроколлоида; зубопротезные заготовки из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, коррозионностойкие артикуляторы

Примечание. Концентрация дезинфицирующих растворов приведена по ДВ.